

Zfx

A COMPANY OF
ZIMMER BIOMET

Zfx™ Converter

Tenha o poder de descodificar
no seu próprio laboratório

ZFX™ CONVERTER

O Zfx Converter é um módulo de software concebido para a descodificação de informação 3D proveniente dos pilares de cicatrização Encode. A interface do software é fácil de utilizar e intuitiva. Os dados descodificados podem ser exportados como ficheiros STL abertos e, posteriormente, importados para o seu software CAD. No software CAD Zfx estão incluídas bibliotecas de restauração e estão também disponíveis para Exocad, 3Shape e Dental Wings. As bibliotecas, módulo de software e a descodificação estão disponíveis gratuitamente.*

SISTEMA DE IMPRESSÃO ENCODE®

Um pilar de cicatrização único 3 em 1, substituindo a necessidade de coifas de impressão, scan bodies e pilares de cicatrização – códigos únicos comunicam a informação do implante para facilitar o desenho da prótese final – pode ser digitalizado com um scanner IOS ou impressão tradicional do pilar de cicatrização Encode.

BENEFÍCIOS DE FAZER O DOWNLOAD DO ZFX CONVERTER

- Descodificar autonomamente
- Resultados imediatos para o design final da prótese
- Aumente o seu negócio providenciando serviços de descodificação e desenho aos clínicos que preferem usar Encode®

GRATUITO
Módulo de software
e descodificação!*



exocad

3shape

dental wings



DOWNLOAD GRATUITO

Faça o download gratuito das bibliotecas de restauração Zfx™ em www.zfx-dental.com


* O laboratório pode fazer gratuitamente o download do Zfx Converter e descodificar gratuitamente, se for usada uma restauração GenTek.



Junte-se ao próximo nível de obtenção de impressões digitais

GUIA DE INSTALAÇÃO

Instale o Zfx Converter em apenas alguns passos e comece a descodificar imediatamente os pilares de cicatrização Zfx Encode.

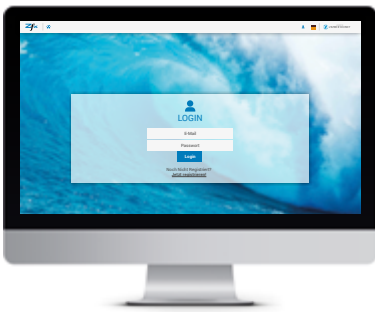

1

REGISTRAR E INICIAR SESSÃO

Crie uma nova conta ou inicie sessão em my.login.zfx-dental.com/Login



2

DOWNLOAD E INSTALAR

Faça o download do Zfx Converter a partir do centro de downloads e instale o software:

my.login.zfx-dental.com/Download/Converter

Encontra instruções detalhadas em

my.login.zfx-dental.com/Help/Converter



3

COMEÇAR A DESCODIFICAR

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.

WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40 • 08940, Cornellà de Llobregat
Tel. +34 - 93 - 470 - 59 - 50 • Fax +34 93 - 372 - 11 - 25
www.zimmerbiometdental.com

Zfx GmbH

Kopernikusstraße 15 • 85221 Dachau, Alemanha
Tel. +49 81 31 33 244-0 • Fax +49 81 31 33 244-10
www.zfx-dental.com

Todo o conteúdo aqui incluído está protegido por direitos de autor, marcas registadas ou outros direitos de propriedade intelectual, conforme aplicáveis, pertencentes ou licenciados pela Zimmer Biomet ou pelas suas empresas afiliadas, exceto indicado em contrário. ©2020 Zimmer Biomet.